



便の採り方について

採便方法


① トイレットペーパーを厚めに折りたたみ、図のように敷いた上に排便します。

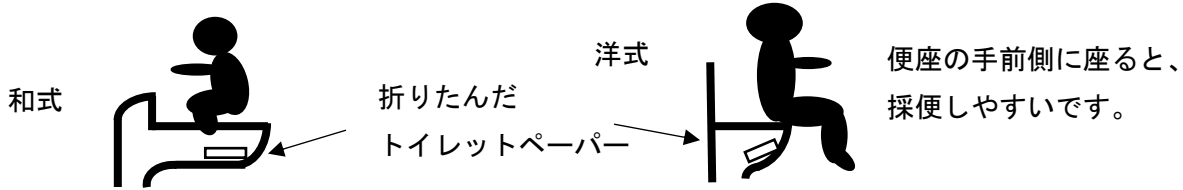

② 採便容器のキャップを開け、先端についている綿棒状の方を便に2、3回さして便を5mm程付着させ本体に戻し、キャップをしっかりと閉めます。

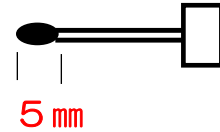

③ ラベルに必ず油性ペンで、店名、氏名、採取日を記入し、図のようにラベルをしっかりと巻き付けます。

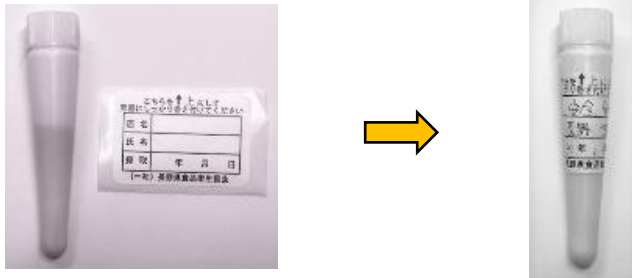

④ 採便した容器はできるだけ速やかに受付場所へ搬入し、すぐに搬入できない場合は、冷暗所に保管し1週間以内に搬入してください。(冷蔵庫には入れないでください)

注意事項

- 危険ですので先端部分を直接肛門に入れて採取しないでください。
- 未使用の採便容器は冷暗所に保管してください。
- 採便容器には寒天培地(うす水色のゼリー状の部分)が入っていますが、寒天培地が乾いている、透明、黄色、茶色に変色している場合は使用することができません。
- 採便容器の使用期限は製造より1年間です。
(保管する環境によっては期限内でも使用できない場合があります。)
- 容器の使用期限は外袋に貼ってあるシールで確認する事ができます。

1900401	19	→	2019年	→	2019年4月製造
	004	→	4月		↓
	01	→	製造ロット		2020年4月まで使用可能

一般社団法人長野県食品衛生協会
食品衛生試験研究所 松本事務所
TEL026-234-9001 TEL0263-87-3187